



TEKNO® SPEZIAL ÖLSPRAY

TEKNO spezial Ölspray zur Instrumentenpflege ist frei von Silikonen, daher keine Flecken- oder Krustenbildung auf der Instrumentenoberfläche. Der Rostbildung wird vorgebeugt. Durch den Gebrauch von Tekno spezial Ölspray wird die Reinigungszeit der Instrumente erheblich verkürzt. Tekno spezial Ölspray ist physiologisch unbedenklich und wird daher vor der Dampf- und Heißluftsterilisation aufgesprüht. Die gute Schmierwirkung bleibt erhalten.

Anwendung

Die Instrumente sind sorgfältig zu reinigen und zu trocknen. Vor dem Besprühen die Instrumente halb geöffnet in mehreren Schichten übereinander in ein Sieb legen. Sparsam aus 20-30 cm Entfernung besprühen. Ein hauchdünner Film genügt. Hartmetall-Instrumente sind zur Vermeidung von metallischem Abrieb regelmäßig einzusprühen.

Hinweise zur Lagerung

Behälter steht unter Druck, vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Treibgas ohne FCKW

Zusammensetzung: Med. Paraffine Oil
Treibgas: Butan/Propan

Bestell-Nummer: tk 95000-00

Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH & Co. KG
Sattlerstrasse 11
78532 Tuttlingen, Deutschland
Tel. +49 (74 61) 17 01-0
www.tekno-medical.com

Hochentzündlich!

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger Luftgemische möglich. Deshalb nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



TEKNO® SPECIAL OIL SPRAY

TEKNO special oil spray for maintenance of surgical instruments is free of silicone, thus stains or crusts are avoided on the surface of the surgical instruments. Prevents to rustgrowth, reduces the time for cleaning. Tekno special oil spray is physiologically unobjectionable and is to be used before sterilization.

Application

Prior to checking for function, surgical instruments with joints and box locks have to be opened and then to be sprayed once or twice, alternative preset instruments trays.

Instructions for storage

Pressurized container, protect from sunlight and do not expose to temperature exceeding 50°C / 122°F. Do not pierce or burn even when empty or spray on a naked flame or any incandescent material. Do not smoke. Keep away from children.

Propellant free of FCHC

Ingredients: Med. Paraffine Oil
Hydrocarbon Propellant

Order number: tk 95000-00

Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH & Co. KG
Sattlerstrasse 11
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 (74 61) 17 01-0
www.tekno-medical.com



Highly inflammable!

Formation of explosive airmixture possible during application. Apply only in sufficiently ventilated areas. Do not smoke.

